

CERAMILL MIND KONSTRUKTIONSSOFTWARE - TASTENBEFEHLE

Allgemeine Shortcuts	
Ceramill Wiki (Hilfe)	F1
Weiter	Strg + Space
Zurück	Strg + Backspace
Rückgängig	Strg + Z
Wiederholen	Strg + Y
Zu nächstem Reiter wechseln	Tab
Zu vorherigem Reiter wechseln	Shift + Tab
Rotieren der Ansicht	rechte Maustaste
Ansicht bewegen	rechte Maustaste + linke Maustaste
Ansicht bewegen	Pfeiltasten
Ansicht zentrieren & neues Rotationszentrum festlegen	Mausrad drücken
Zoom ein & aus	Mausrad scrollen
Ansicht zentrieren & neues Rotationszentrum festlegen	Pos1
Optimierung der Remote-Ansicht des Teamviewers/Netviewer/Remote Desktop/VNC etc.	Strg + Shift + F3
Temporär, während halten der Alt Taste, alle Objekte anzeigen	Alt

Präpfgrenze festlegen	
Erkennen/Punkt hinzufügen	1
Punkt entfernen	2
Präpfgrenze bearbeiten	3
Punkte hoch/runter bewegen	4
Ändern/Zeichnen	5
Auf/ab bewegen	+/-
Löschen	Strg + X

Kronen/Inlay/Veneer - Böden	
aktiviert Pinsel für 1., 2., 3. Zementspaltbereich	1/2/3

Freiformen	
Aktiviert Auf-/Abtragen	1
Aktiviert Glätten	2
Aktiviert Höcker, Zahnbereiche, ganzen Zahn oder Leisten bewegen	3/4/5/6
Aktiviert die verschiedenen Pinseltypen Standard/Messerspitze/Zylinder	F2/F3/F4
Entfernen antagonistischer, approximaler und gingivaler Durchdringungen	Strg + X
Entfernen ausschließlich approximaler Durchdringungen	Strg + N
Entfernen ausschließlich gingivaler Durchdringungen	Strg + G
Entfernen ausschließlich antagonistischer Durchdringungen	Strg + A
De/selektieren Äquator fixieren	Strg + Q
De/selektieren Höckerspitzen fixieren	Strg + T
De/selektieren „nur okklusal“ bewegen	Strg + M

Totalprothetik Modellanalyse	
Weiter	Enter
Zurück	Backspace

Werkzeuge ein/ausblenden	
de/aktivieren „Abstandsanzeige“	Strg + D
de/aktivieren „Abstandsmesser“	Strg + R
de/aktivieren „Schnittansicht“	Strg + P

Ein-/Ausblenden Fenster	
Blendet Teile der Maus aus	Strg + Mausrad drücken
Blendet zuletzt ausgeblendetes Teil wieder ein	Strg + SHIFT + Mausrad drücken
Ändert die Transparenz der Teile unterhalb der Maus	SHIFT + Mausrad drücken
Ein-/Ausblenden des Antagonisten	A
Ein-/Ausblenden des Kieferscans	S
Ein-/Ausblenden des Oberkiefers (MaXillae)	X
Ein-/Ausblenden des Unterkiefers (MaNdible)	N
Ein-/Ausblenden der Gingivascans	G
Ein-/Ausblenden der Anatomie bei reduzierten Teilen	E
Ein-/Ausblenden der Anatomie bei vollanatomischen Teilen	F
Ein-/Ausblenden der reduzierten Teile	R
Ein-/Ausblenden der Verbinder	C
Ein-/Ausblenden des Waxupscan	W
Ein-/Ausblenden von 2D Bildern	I
Ein-/Ausblenden von DICOM-Daten	D
Ein-/Ausblenden des Situationsmodell	P
Ein-/Ausblenden der virtuellen Gingiva	V
Ein-/Ausblenden der Kronenböden	C
Ein-/Ausblenden der zusammengefügteten Teile	M
Ein-/Ausblenden von Teleskopen	T
Ändern der Transparenz des jeweiligen Teiles	Shift + Hotkey